

Administrer un bolus prolongé pour la pompe à insuline t:slim X2

Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de votre pompe à insuline Tandem, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.



1. Touchez **0 grammes** pour saisir les glucides pour votre bolus.

REMARQUE : Si cette zone indique « unités », la fonction des glucides est désactivée dans le profil en cours.



2. Saisissez la valeur souhaitée. Assurez-vous que « grammes » est affiché au-dessus du clavier pour les bolus repas.

Touchez **✓** pour continuer.



3. Touchez **✓** pour continuer, puis **✓** pour confirmer.

REMARQUE : Si une glycémie supérieure à la cible est saisie, le bolus de correction ne sera pas prolongé.

REMARQUE : Si une session SGC est active, et si une valeur de SGC et une flèche de tendance de SGC sont toutes deux présentes sur l'écran Accueil SGC, votre valeur de glycémie est saisie automatiquement dans le champ Ajouter glyc.




4. Placez le bouton à bascule en position activée pour prolonger le bolus.

Touchez **✓** pour continuer.



5. Touchez **✓** pour utiliser les paramètres par défaut ou **ADMIN. MAINT.** et **DURÉE** pour régler les valeurs souhaitées, puis touchez **✓** pour continuer.

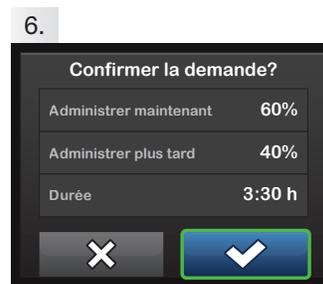

Touchez **✓** pour confirmer.



7. L'écran d'administration confirmera la quantité d'insuline qui sera administrée immédiatement pour les glucides (et tout bolus de correction), la quantité qui sera administrée plus tard et la durée de l'administration. Touchez **✓** pour démarrer le bolus.



8. L'écran **BOLUS LANCÉ** s'affiche pour confirmer le démarrage de l'administration.



9. Pour annuler la partie du bolus non administrée, touchez **X** en face de **BOLUS** sur l'écran Accueil, puis touchez **✓** pour confirmer l'annulation du bolus.