


Profils personnels

pour la pompe à insuline t:slim X2

Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de votre pompe à insuline Tandem, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.

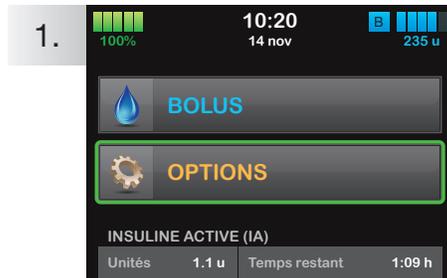

1. Touchez **OPTIONS**.



2. Touchez **Ma pompe**.



3. Touchez **Profils personnels**.



4. Touchez le nom du Profil personnel que vous souhaitez afficher ou modifier.



5. Touchez **Modifier** pour modifier ou afficher vos paramètres.



6. Touchez vos paramètres actuels pour afficher les autres plages horaires.



7. Touchez la plage horaire que vous souhaitez modifier.
Si les plages horaires ne sont pas toutes visibles, touchez la flèche vers le bas.



8. Touchez **Basal**, **Facteur de corr.**, **Ratio gluc.** ou **Cible** pour apporter des modifications, puis touchez .
Une fois terminé, touchez .



9. Confirmez les réglages. Les modifications récentes sont affichées en orange.
Touchez pour confirmer.



TANDEM™
DIABETES CARE

(833) 509-3598
tandemdiabetes.ca



t:simulator App
Une démo aussi simple que nos pompes!



POUR UTILISATION AU CANADA UNIQUEMENT

