

# Arrêter et reprendre l'administration d'insuline pour la pompe à insuline t:slim X2


Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de votre pompe à insuline Tandem, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.




## Arrêter l'administration d'insuline



1. Touchez **OPTIONS**.

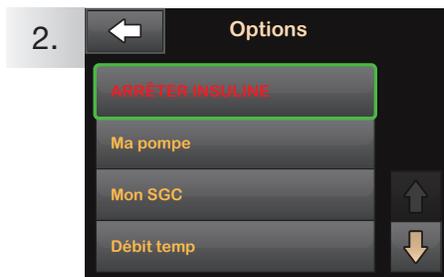

2. Touchez **ARRÊTER INSULINE**.

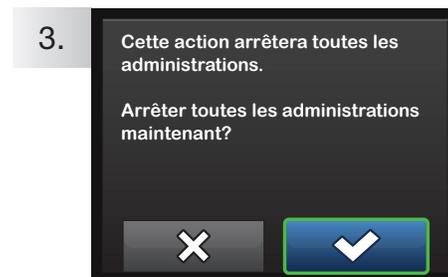

3. Touchez .




## Reprendre l'administration d'insuline



1. Touchez **OPTIONS**.



2. Touchez **REPRENDRE INSULINE**.

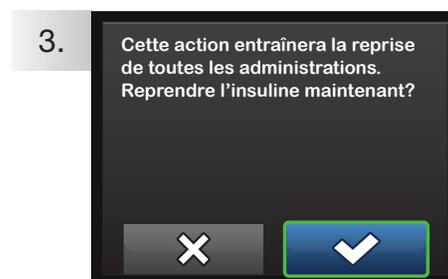

3. Confirmez en touchant .

**REMARQUE :** Si la minuterie d'un débit basal temporaire est encore active à la reprise de l'insuline, celui-ci reprendra au temps restant. Si un bolus est en cours d'administration au moment d'arrêter l'insuline, la partie non administrée sera annulée.



**TANDEM**  
DIABETES CARE

(833) 509-3598  
tandemdiabetes.ca



**t:simulator App**  
Une démo aussi simple  
que nos pompes!

Télécharger dans  
**iApp Store**

DISPONIBLE SUR  
**Google Play**

POUR UTILISATION  
AU CANADA  
UNIQUEMENT

