


# Visualiser l'état

## pour la pompe à insuline t:slim X2

Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de votre pompe à insuline Tandem, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.

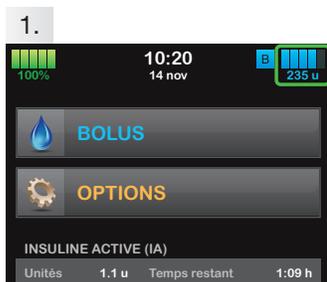

1. Touchez l'icône du niveau d'insuline dans le coin supérieur droit de l'écran Accueil.



2. Votre pompe t:slim X2 affichera le nom de votre profil en cours, votre débit basal actuel, l'heure et la quantité de votre dernier bolus, et la saisie ou non des bolus basée sur la quantité de glucides consommée.

Si vous utilisez la fonction de bolus prolongé, cet écran affichera la quantité d'insuline administrée par rapport à la quantité totale demandée.



3. Touchez la flèche vers le bas pour afficher le facteur de correction, le ratio de glucides, la cible et la durée d'insuline actuellement utilisés.



4. Touchez la flèche vers le bas pour afficher l'état du dernier étalonnage, du capteur démarré, de la batterie de l'émetteur et de la connexion mobile.



## Explication des icônes



Les icônes suivantes peuvent s'afficher dans les zones à gauche ou à droite de l'heure et de la date de l'écran Accueil de votre pompe t:slim X2.

- Un rappel, une alerte, une erreur ou une alarme du système est actif (active). Déverrouiller l'écran pour l'afficher.
- Un bolus est en cours d'administration.
- L'insuline basale est programmée et en cours d'administration.
- Un débit basal temporaire est actif.
- Toutes les administrations d'insuline sont arrêtées.
- Un débit basal de 0 u/h est actif.
- Un débit basal temporaire de 0 u/h est actif.

