

Définir un débit basal temporaire pour la pompe à insuline t:slim X2

Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de votre pompe à insuline Tandem, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.




1. Touchez **OPTIONS**.



2. Touchez **Débit temp**.



3. Touchez **Débit temp**.

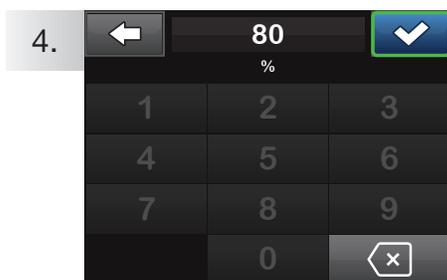

4. Saisissez le pourcentage souhaité à l'aide du clavier à l'écran. Touchez .



5. Touchez **Durée**. À l'aide du clavier à l'écran, saisissez la durée souhaitée pour le débit temporaire. Touchez .



6. Vérifiez les réglages et touchez . **REMARQUE :** Pour afficher les unités réelles à administrer, touchez Voir unités.



7. L'écran **DÉBIT TEMP DÉMARRÉ** s'affiche pour confirmer le démarrage du débit temporaire.



8. L'écran Verrouillage écran s'affiche avec une icône en T orange indiquant qu'un débit temporaire est actif. **REMARQUE :** Si un débit temporaire de 0 % est actuellement en cours, l'icône en T orange est remplacée par une icône en T rouge.



9. Pour arrêter le débit temporaire à tout moment, touchez **OPTIONS**, puis . Un écran de confirmation s'affiche. Touchez .



TANDEM™
DIABETES CARE

(833) 509-3598
tandemdiabetes.ca



t:simulator App
Une démo aussi simple
que nos pompes!



POUR UTILISATION
AU CANADA
UNIQUEMENT

