

Administrer un bolus pour la pompe à insuline t:slim X2

Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de votre pompe à insuline Tandem, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.



1. Touchez **0 grammes** pour saisir les glucides pour votre bolus.

REMARQUE : Si cette zone indique « unités », la fonction des glucides est désactivée dans le profil en cours.



2. Saisissez la valeur souhaitée. Assurez-vous que « grammes » est affiché au-dessus du clavier pour les bolus repas. Touchez **✓** pour continuer.




3. Touchez **Ajouter glyc.** Pour saisir votre glycémie.

REMARQUE : Si une session SGC est active, et si une valeur de SGC et une flèche de tendance de SGC sont toutes deux présentes sur l'écran Accueil SGC, votre valeur de glycémie est saisie automatiquement dans le champ Ajouter glyc.




4. Saisissez la valeur souhaitée. Assurez-vous que « mmol/L » est affiché au-dessus du clavier lors de la saisie des valeurs de glycémie.

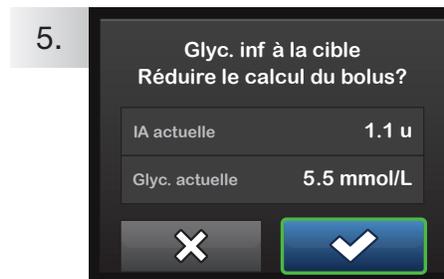

5. Si la glycémie saisie est inférieure à la cible mais supérieure ou égale à 3.9 mmol/L, vous aurez la possibilité de réduire la quantité de bolus. Pour accepter cette réduction, touchez **✓**; sinon, touchez **x**.



6. Touchez **✓** pour continuer. Touchez la valeur des unités calculées pour ajuster manuellement la dose recommandée.

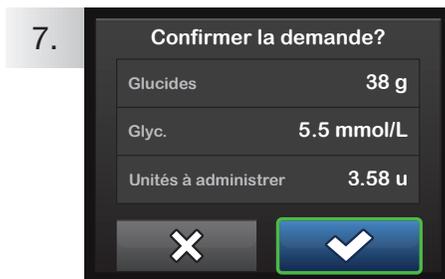

7. Vérifiez la dose et touchez **✓** pour confirmer.

REMARQUE : Les calculs ci-dessous sont basés sur des ratios insuline-glucides et des facteurs de correction prédéfinis; ils peuvent être réglés dans Profils personnels.



8. Touchez **✓** pour administrer immédiatement le bolus repas. L'écran BOLUS LANCÉ s'affiche pour confirmer le démarrage de l'administration.



9. Pour annuler la partie du bolus non administrée, touchez **x** la croix blanche en face de BOLUS sur l'écran Accueil, puis touchez **✓** pour confirmer l'annulation du bolus.



TANDEM™
DIABETES CARE

(833) 509-3598
tandemdiabetes.ca



t:simulator App
Une démo aussi simple
que nos pompes!



POUR UTILISATION
AU CANADA
UNIQUEMENT

