



## Prendre l'avion avec votre pompe à insuline Tandem

Si vous prévoyez de prendre l'avion avec votre pompe à insuline, un peu de planification pourra faciliter le passage au contrôle de sécurité. Votre appareil est conforme aux normes de transmission sans fil de la FAA et vous pouvez l'utiliser en toute sécurité durant le vol. De plus, il résiste aux interférences électromagnétiques courantes et peut être soumis aux détecteurs de métal sans risque.

Toutefois, votre pompe à insuline Tandem ne doit PAS être exposée aux appareils à rayons X, y compris les dispositifs d'inspection des bagages et les détecteurs

à balayage corporel utilisés dans les aéroports. Nous vous recommandons de la débrancher au site de perfusion et de demander à l'agent de sécurité d'opter pour une autre méthode de détection. Si vous préférez la laisser branchée, vous pouvez informer l'agent de sa présence et demander à passer sous un détecteur de métal ordinaire en gardant la pompe sur vous.

Il pourrait être utile de présenter une version imprimée du document qui suit à l'agent de sécurité au moment de l'inspection.



Si vous avez des questions sur l'utilisation de la pompe durant votre voyage, communiquez avec l'Assistance client de Tandem au **+1 (365) 509-2044** ou **consultez le site [tandemdiabetes.ca](http://tandemdiabetes.ca)**.

Pliez ici

Montrez ce document au représentant de l'ACSTA ou de l'aéroport.

### À l'intention du représentant de l'ACSTA ou de l'aéroport :

Cet appareil est une pompe à insuline de Tandem Diabetes Care, un appareil médical vital prescrit par un médecin. Il résiste aux interférences électromagnétiques courantes et peut être soumis aux détecteurs de métal en toute sécurité, mais ne doit pas être exposé à quelque forme que ce soit de rayons X. Cette précaution vaut pour les dispositifs d'inspection des bagages et les détecteurs à balayage corporel.

Veuillez donc soumettre cette pompe à insuline à une autre méthode de détection que les rayons X. Pour toute question sur cet appareil, communiquez avec l'Assistance client de Tandem au **+1 (365) 509-2044**.

Cordialement,  
**Tandem Diabetes Care**



Détecteurs de métal



Rayons X, y compris les dispositifs d'inspection des bagages et les détecteurs à balayage corporel

